

- HPV 疫苗：是针对未感染人群的预防
- P HPV 凝胶：是针对已感染人群的康复

福莱明生物
致力于让女性不再有宫颈癌的风险!

P HPV[®] 凝胶

融合因子抑菌凝胶

(原融合因子阴道阻菌凝胶衍生产品)

PHPV 融合因子(重组类胶原蛋白)

- ① 全球首创高效生物防御蛋白
- ② 国家药监局医疗器械原材料主文档登记
- ③ 两项中国发明专利
- ④ 已收录于国际基因蛋白数据库
- ⑤ 主要功效：抗病毒、抗细菌、抗肿瘤、促修复。
融合因子能以正负电荷相亲和的物理作用，
清除体内潜伏病毒，阻断体外自体传播，
抑制HPV癌基因E6/E7mRNA的表达。



融合因子系列产品

原 PHPV融合因子阴道阻菌凝胶
及迭代产品：PHPV卡拉胶凝胶

已通过多中心 RCT 验证

中国临床试验注册中心
研究注册号：ChiCTR2200063608
中南大学湘雅二医院
复旦大学附属妇产科医院
上海市红房子医院
循证医学验证：有阻断病菌感染的作用

广西福莱明生物制药有限公司


GUANGXI FULAIMING BIOPHARMACEUTICAL CO.,LTD.

✦ 从0到1的突破, P HPV 融合因子开启HPV康复新时代

经高通量筛选高效表达的 PHPV 融合因子及其生物防御与修复功能

① 中国发明专利号: ZL 2023 1 1001988.9
一种重组生物防御融合蛋白及其应用

② 中国发明专利号: ZL 2024 1 0789359.5
一种生物防御和创伤修复的重组类胶原蛋白

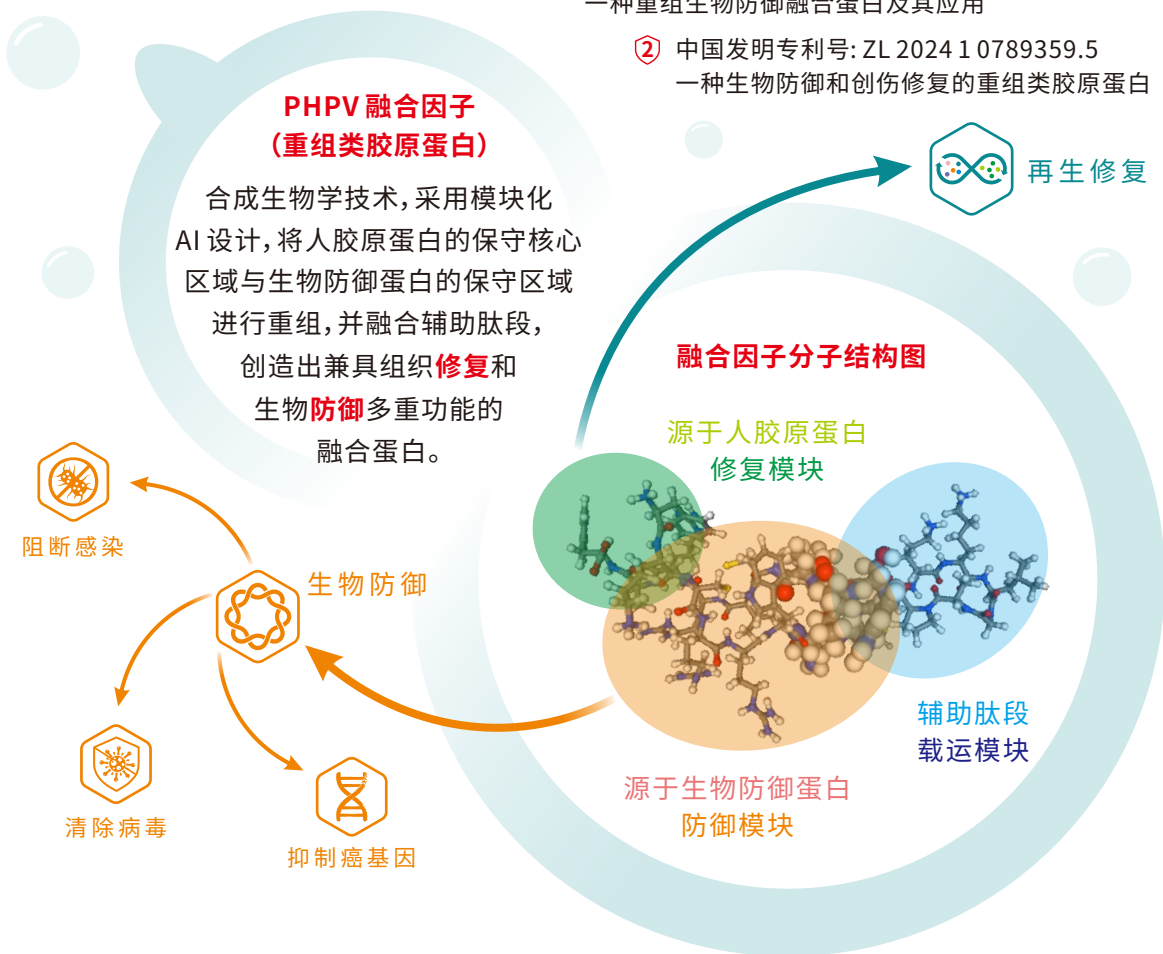

✦ 融合因子在生殖健康领域展现的三大功能

促进粘膜修复功能

修复阴道黏膜微小损伤, 增强局部生物防御屏障

平衡微生态调节功能

恢复并维持健康的阴道菌群环境

再生
修复

强力
阻断

平衡
调节

生物防御功能

在物理保护膜基础上, 通过电荷吸附中和胞内外病毒, 达到清除病毒, 阻断自体传播, 抑制E6/E7mRNA表达


融合因子阴道阻菌凝胶高效康复HPV疗效经权威临床证实

湘雅二院随机对照试验
(注册号: ChiCTR2200063608)



研究设计:

采用随机平行对照设计,
由中南大学湘雅二医院
临床研究伦理委员会批准
(批件文号:(2021)伦审【临研】第(129)号)

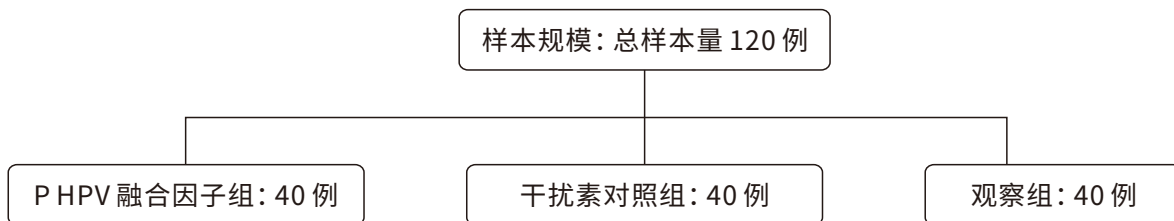

研究对象: 25-45岁有性生活史的女性患者,持有一个月內HPV分型、HPV E6/E7 mRNA阳性检查结果主要评价指标: HPV分型定量检测(采集宫颈脱落细胞标本)

临床结果与结论: 与干扰素相比, P HPV融合因子组

1. 有效降低 HPV 持续感染患者的病毒载量, 促进转阴。
2. 显著抑制患者HPV癌基因E6/E7的表达, 预防宫颈病变, 三个月疗效好于干扰素。
3. 显著改善阴道微生态。

融合因子抑菌凝胶多效协同, 能实现感染全周期康复

① 阻断-修复-平衡调节为核心

融合因子/卡拉胶络合病毒颗粒, 阻断抑制HPV与其它病原体的同时, 融合因子修复受损的黏膜, 联合卡拉胶增强免疫, 防止致病菌再度入侵, 降低了复发风险。

② 卡拉胶防治HPV效果显著, 顶级期刊重磅发布

加拿大CATCH临床试验显示卡拉胶凝胶能降低HPV感染发生率37%。
研究结论:卡拉胶凝胶可以作为HPV疫苗防治HPV感染的有效补充。

③ 临床研究证实:卡拉胶能大幅提升转阴率

意大利临床研究发现:应用卡拉胶凝胶40天能近三倍提升高危型HPV转阴率,
安全且耐受性良好

HPV 感染全周期康复专业型

P HPV[®] 融合因子抑菌凝胶

安全性更高：免洗设计，避免微生态失衡


高效康复：
转阴率高
复发率低

使用便捷：
过程舒适
依从性高




+ 轻松外用 安全放心


阴道私密处日常抑菌清洁睡前使用，避开生理周期；外阴使用轻揉按摩后冲洗

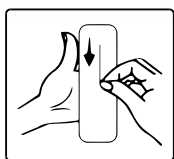


1. 取出推注器

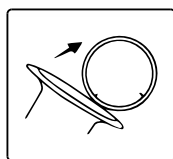


2. 取下后盖

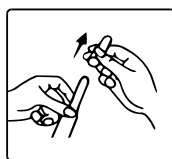


3. 取下保护管

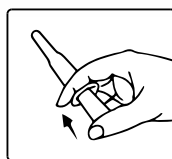

4. 用保护管作助推杆

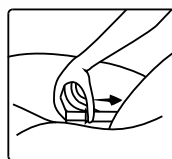

5. 缓慢放入阴道

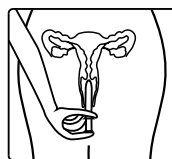

6. 将凝胶推注至宫颈处

使用范围

本品有抑制致病性酵母菌、化脓性球菌、肠道致病菌的作用，可用于私密处日常抑菌清洁。不应用于性生活中对性病的预防。

使用方法

撕开包装，取出推注器，先取下后盖，再取下保护管，人仰卧，将推注器缓慢放入阴道达阴道后穹窿深部宫颈处，用保护管作助推杆，将凝胶推注至宫颈处 作用2min。（可适当用护垫保护，以防外溢。）

监制单位：香港医药有限公司
生产企业：广西福莱明生物制药有限公司
生产地址：南宁市国凯大道东19号14栋4楼

公司网址：www.gxflm.com
咨询热线：0771-4876033
(内部资料 仅供医学专业人士参考)

